

Alvéolites sèches?
Soulagez la douleur.



Alveogyl
Pansement alvéolaire



Alveogyl est le pansement alvéolaire idéal en cas d'alvéolite sèche, soulageant rapidement vos patients et facile à utiliser. Alveogyl peut aussi être utilisé comme pansement alvéolaire après extraction dentaire.

Alveogyl est un traitement en une séance s'éliminant progressivement, et ne demandant ni suture ni attention particulière hormis la surveillance du processus de cicatrisation. Il procure un effet calmant sur les tissus alvéolaires, permettant ainsi de rapidement soulager la douleur. Sa texture fibreuse, grâce aux fibres de Penghawar, permet une mise en place facile et une bonne adhérence à l'alvéole.

Caractéristiques	Atouts	Avantages
Pansement alvéolaire dans le cas d'alvéolites sèches	Favorise l'hémostase par compression	Aide à soulager rapidement la douleur Protège de la surinfection
Composition à base de fibres de Penghawar	Dispose d'une texture fibreuse	Bonne adhérence à l'alvéole durant l'ensemble du processus de cicatrisation
Aucune suture nécessaire	Ne demande pas d'attention particulière hormis la surveillance du processus de cicatrisation	Pratique et facile d'utilisation
S'élimine tout seul	Traitement en une séance	Consultations de contrôle non nécessaires

Indications

Alveogyl est une pâte utilisée en tant que pansement alvéolaire dans le cas d'alvéolites sèches ou après une extraction dentaire difficile ou traumatique chez des patients ayant un historique d'alvéolites sèches.

Mode d'emploi

- Prélever une petite boulette de pâte (environ 0,20 g)
- Insérer dans l'alvéole dentaire préparée préalablement
- Ne pas suturer



Présentation

Pot contenant 10 g de pâte

Alveogyl est un dispositif médical de classe IIa – CE0459

Septodont – Avenue de la Constitution 87 - 1083 Bruxelles

Tél. : +32 (0)2 425 60 37 – Fax : +32 (0)2 425 36 82

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

www.septodont.be

